

## Guide de référence rapide

# Ksmart® SARS-COV-2 Antigen Rapid Test avec le LabPad® Evolution.



Lisez attentivement la notice d'utilisation du test Ksmart® SARS-COV-2 Rapid test et le manuel d'utilisation du LabPad® Evolution avant d'effectuer le test.

## 1 Identification du patient


### Stand Alone

Sans identification préalable du patient

### Avec un lecteur de code à barre



### Avec une APP pour tablette/smartphone/PC

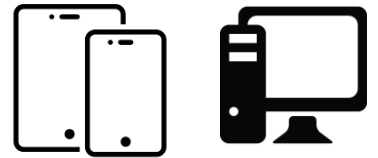


## 2 Préparation de l'échantillon

### Prélèvement nasopharyngé



Prélèvement correct

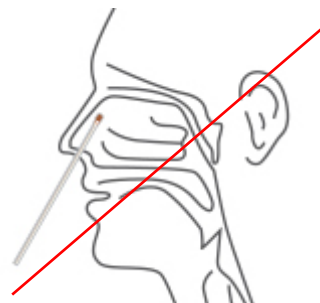

Mauvais prélèvement



Ajoutez 300µL (6 gouttes) de tampon d'extraction R1



Tourner vigoureusement pendant 10 secondes



Pressez les bords du tube pour extraire la solution d'antigènes



Insérez fermement le bouchon goutte à goutte sur le tube



### 3 Dépôt de l'échantillon sur la Ksmart.



### 4 Laisser la Ksmart® à l'horizontal.

#### Mode standard




Attendez la fin de la migration avant d'insérer la Ksmart dans le LabPad.

#### Mode point final



### 5 Insérer la Ksmart® dans le LabPad® Evolution.

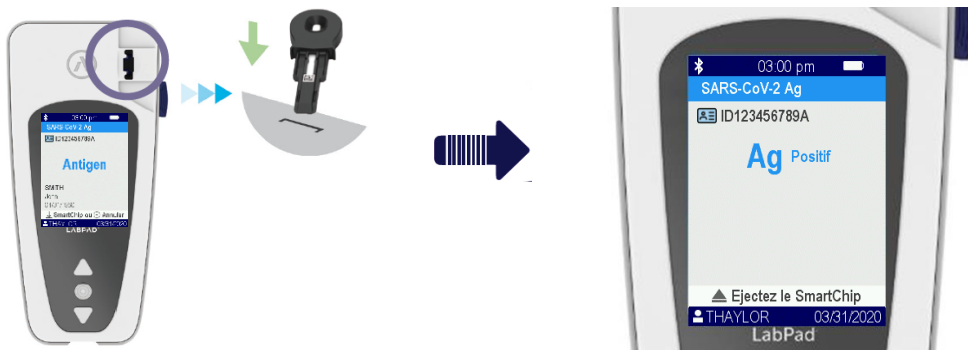

### 6 Jeter la Ksmart®.

