

Guide de référence rapide

Tsmart[®] INR

avec le LabPad[®] Evolution.

1 Identification du patient


Stand Alone

Sans identification préalable du patient

Avec un lecteur de code à barre




Avec une APP pour tablette/smartphone/PC

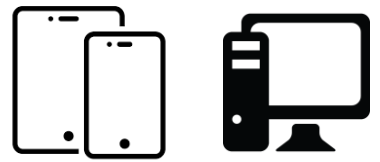

2 Insérez la Tsmart[®] dans le LabPad[®] Evolution jusqu'au « Clic ».

- Utilisez le LabPad[®] Evolution dans un endroit suffisamment éclairé. Pour effectuer un test, placez votre appareil sur une surface stable, plane et exempte de vibrations.
- Une fois sortie de son sachet, la Tsmart doit-être utilisée dans les 10 minutes.
- Insérez la Tsmart dans le LabPad, appuyez fermement jusqu'à entendre un « Clic ».

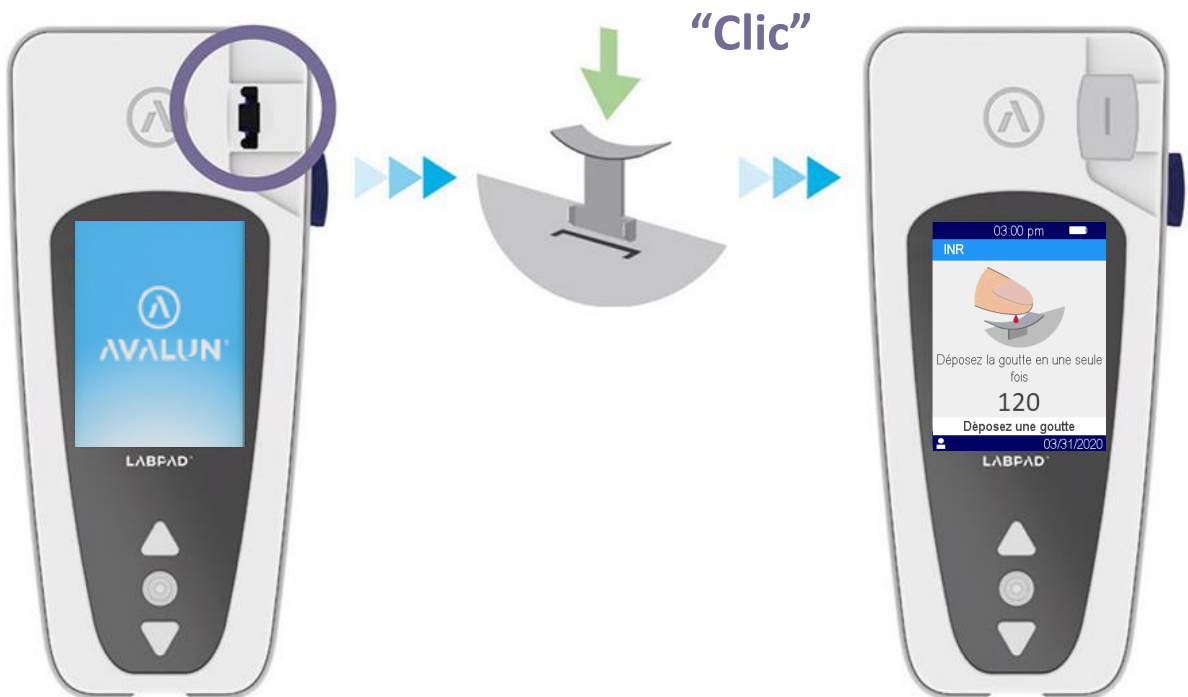

3 Prélèvement capillaire.




- Main propres et sèches.




- Recommandé d'utiliser une lancette de gauge 21.

4 Dépôt de la goutte de sang en une seule fois.

Il est possible d'utiliser des micropipettes, en plastique uniquement (peuvent être fournies).

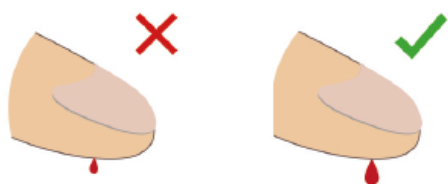

- 5 μ l de sang est nécessaire

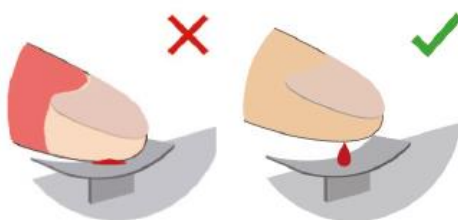

- Ne pas comprimer le doigt sur la coupelle.
- Utiliser une "Goutte Pendante" de sang.

5 Affichage du résultat.



6 Ejection de la Tsmart® INR.

